



Kayganlaştırıcı ve nemlendirici oftalmik solüsyon
%0,2 Sodyum Hiyalüronat

10 veya 20 x 0,5 ml koruyucu içermeyen tekrar kapatılabilir vialler

Bileşim:

Sodyum hiyalüronat (%0,2 a/h), dibazik sodyum fosfat, monobazik sodyum fosfat, sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

Hy-Light nedir?

Hy-Light, steril, koruyucu içermeyen, sodyum hiyalüronat göz damlası solüsyonudur.

Nasıl sunulur?

Hy-Light, 10 veya 20 koruyucu içermeyen yeniden kapatılabilir 0,5 ml'lik viallerde sunulur.

Ne zaman kullanılmalıdır?


Hy-Light, biyoteknolojik sentezle elde edilen, yüksek moleküler ağırlıklı sodyum hiyalüronatın oftalmik bir solüsyonudur.

Sodyum hiyalüronat, gözyaşı filminin nemlendirme etkisi ve stabilizasyonu ile sonuçlanan solüsyonların viskozitesinden dolayı optimum kayganlaştırıcı özelliklere sahip mukomimetik solüsyonlardan kaynaklanan bir maddedir.

Sodyum hiyalüronatın kayganlaştırıcı, nemlendirici ve koruyucu özellikleri, çevresel unsurlar (rüzgar, güneş, duman, kuru hava), görsel stres (aşırı ışık ve uzun süreli bilgisayar kullanımı) veya mekanik faktörlerden (kontakt lens kullanımı, oküler cerrahi sonrası) kaynaklanan tahriş, kuruluk, yanma ve yabancı cisim hissinin gidererek uzun süreli bir rahatlama sağlar. Ürün koruyucu içermez ve kontakt lenslerle kullanıma uygundur.

Nasıl ve ne kadar kullanılır?

- Alüminyum poşeti açınız ve bir vial vial şeridinden ayırınız.
- Kapağı çevirerek ve çekerek açınız.
- İhtiyaca göre günde bir veya birkaç kez vialin gövdesini hafifçe sıkarak göze bir damla damlatınız.
- Hy-Light tekrar kapatılabilen viallere doldurulmuştur ve kalem ürün 12 saate kadar kullanılabilir.

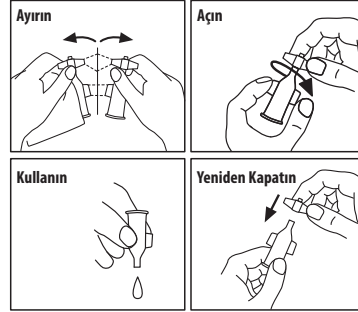

Önlemler ve uyarılar

- Ürün sadece harici oftalmik kullanım içindir.
- Kap hasar görmüşse kullanmayınız.
- Bileşenlerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz varsa kullanmayınız.
- Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- Vialin ucuyla göze dokunmayınız.
- Nadiren uygulamadan sonra solüsyonun viskozitesinden dolayı hafif bir geçici görme bulanıklığı gözlenebilir; bu nedenle, net görüş gerektiren herhangi bir aktiviteye girişmeden önce bulanıklığın ortadan kalkmasını beklemeniz tavsiye edilir.
- Diğer oftalmik ilaçları uygulamadan en az 10-15 dakika önce bırakınız.
- Her vial açıldıktan sonra 12 saate kadar kullanılabilir.
- Çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- 25 °C'nin altında saklayınız.
- Yutmayınız.

Üretici: Farmigea S.p.A.-Via G.B. Oliva, 6/8-56121, Pisa, İtalya

Türkiye'de İthalatçı ve Dağıtıcı Firma: Vist Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Gümüşpala Mah. Savaş Sok. No:16 / C Avcılar/İstanbul

Metnin son revizyon tarihi: Temmuz 2017



Kullandıktan sonra uygun şekilde imha ediniz.

STERILE A **CE** 0546