

Dermatix® Ultra Jel



Yeni iyileşen yaralarda yara izi oluşumunun önlenmesi ve olgunlaşmamış belirgin yara izlerinin azaltılması için topikal silikon jel.

Dermatix® Ultra Jel nedir?

Dermatix® Ultra Jel, hızlı kuruyan, şeffaf, topikal silikon jeldir. Yanıklar, ameliyatlara ve diğer yaralanmaların neden olduğu yara izlerini tedavi ederken, cildin nem dengesinin korunmasına da yardım eder.

Dermatix® Ultra Jel'in, yara izlerini düzleştirdiği, yumuşattığı ve düzgünleştirdiği, kaşıntı ve yara izinin rahatsızlığını giderdiği ve beraberindeki kızarıklığı azalttığı gösterilmiştir.

Dermatix® Ultra Jel, hafif, yağlı olmayan bir formüldür. Yüz, eklem ve eklemlerin katlanma yerleri dahil tüm deri alanlarına kolaylıkla uygulanabilir, görünmez bir katman oluşturacak şekilde hızla kuruyarak, deride temiz ve ipeksi bir his bırakır.

Topikal silikon jel örtüsü şeklinde aynı basit uzun zincir polimerlerden üretilen Dermatix® Ultra Jel, bir tüp içerisinde sunulmaktadır.

Dermatix® Ultra Jel, piyasada 15 g'lık tüpte jel formunda bulunur.

İçindekiler

Polimerik ve siklik siloksanlar ile vitamin C esteri.

Dermatix® Ultra Jel ne için kullanılır?

Dermatix® Ultra Jel, keloid ve hipertrofik yara izlerinin (genel cerrahi işlemler, travma yaraları ve yanıklar nedeniyle oluşanlar gibi) önlenmesinde ve tedavisinde, ideal olarak, yara iyileşir iyileşmez ve deri yüzey bütünlüğü sağlandıktan hemen sonra kullanılır. Yaranın kapanmasından sonra 2 yıla kadar devam eden aktif iyileşme sürecindeki olgunlaşmamış belirgin kırmızı yara izlerinde de kullanılabilir.

Dermatix® Ultra Jel nasıl kullanılmalıdır?

Tüpün kapağını çıkarınız ve tüpün ucunu kesiniz. İlgili alanı yıkayıp, nazikçe kurulayınız. Dermatix® Ultra Jel, sadece temiz, kuru cilt üzerine uygulanmalıdır. Yara izi üzerine küçük bir miktar jeli çok ince bir tabaka halinde hafif masaj yaparak sürünüz; giysilerde leke yapmaması için fazlasını bir mendille silip alın. Kuruduktan sonra üzerine makyaj yapılabilir. En az iki ay süreyle sabah bir kez ve akşam bir kez uygulayınız; ancak bazı dirençli yara izlerinde daha uzun süreli bir tedavi gerekli olabilir. Dermatix® Ultra Jel, çocuklarda da kullanılabilir.

Dermatix® Ultra Jel ne zaman kullanılmamalıdır?

- Dermatix® Ultra Jel, iyileşmemiş açık yaralara uygulanmamalıdır.
- Dermatix® Ultra Jel, mukozalara (ağız, burun delikleri) temas ettirilmemelidir, gözlerin yakın çevresine uygulanmamalıdır.
- Dermatix® Ultra Jel, doktorunuzun önerisi olmaksızın diğer cilt tedavilerinin üzerine uygulanmamalıdır.

Dermatix® Ultra Jel olası bir istenmeyen etkiye neden olur mu?

Jel nadir olarak, ciltte kızarıklık, ağrı veya iritasyona yol açabilir. Bu belirtiler veya başka bir istenmeyen etki ortaya çıkarsa doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Dermatix® Ultra Jel nasıl muhafaza edilmelidir?

- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- 25 °C'nin altındaki sıcaklıklarda ve ısı kaynaklarından uzakta saklayınız.
- Ambalajında belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Diğer Bilgiler

Dermatix® Ultra Jel hakkında daha fazla bilgiyi eczacınızdan veya doktorunuzdan alabilirsiniz.

Kullanım kılavuzunun en son güncelleme tarihi: Mayıs 2025



Hanson Medical, Inc., 25960 Ohio Avenue NE, Suite 200 Kingston, WA 98346 USA, ABD



Vist Pharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
Bina No: 9 İç Kapı No: 27
Küçükçekmece / İstanbul
Tel: 0212 201 61 61



19416
OS-067-0